

PACK DE 10 UDS. mascarillas higiénicas lavables reutilizables

ADULTOS Y NIÑOS

PRODUCTO

Pack de 10 mascarillas higiénicas lavables reutilizables para adultos y niños. Diseño que protege cómodamente toda la superficie de nariz, boca y mentón, con gomas anchas para mayor confort en su enganche.

USO

Para uso personal o laboral; en interiores o exteriores.

COMPOSICIÓN

1ª Capa: POLYPROPYLENE SPUNBONDED NOW WOVEN 50 gr. M2


2ª Capa: ESPUMA PU POLIÉSTER DE BAJA DENSIDAD

3ª Capa: POLYPROPYLENE SPUNBONDED NOW WOVEN 50 gr. M2

OTROS COMPONENTES

Elastico 5 mm de ancho 55% poliéster texturado + 45% látex.

El proceso de fabricación y sus materiales respetan el medio ambiente y cumplen con la aplicación del REGLAMENTO REACH (CE) nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y a la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) de 18 de diciembre de 2006.

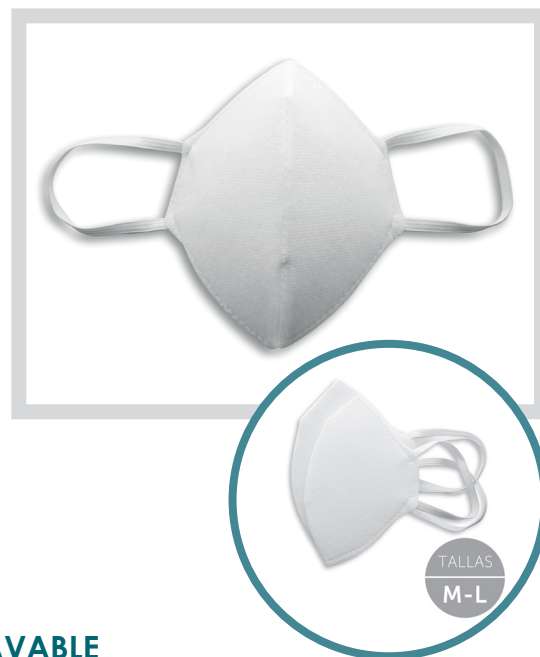

LAVABLE

Recomendamos lavar la mascarilla hasta un máximo de 5 lavados mediante ciclo completo de lavado con el detergente habitual, a una temperatura máxima de 60°C.

TALLAS

- Talla M (a partir de 9 años aprox.)
- Talla L (a partir de 12 años aprox.)

ADVERTENCIA

· Este dispositivo no es un producto sanitario (PS) en el sentido de la Directiva 93/42 CE o del Reglamento UE/2017/745, ni un equipo de protección individual (EPI) en el sentido del Reglamento UE/2016/425.

· En niños, la colocación, uso y retirada de la mascarilla estará bajo la supervisión de un adulto.

MASCARILLA REUTILIZABLE	Temperatura ciclo lavado	BFE - Eficiencia a la filtración bacteriana	Valor
Método referencia: ISO 6330:2012	60°C	Método referencia: EN 14683:2019+AC:2019 Anexo B	85,65 %
RESPIRABILIDAD (Presión diferencial)	Antes del ciclo de lavado	Tras 5 ciclos de lavado	
Método referencia: EN 14683:2019+AC:2019 Anexo C	12,3 Pa/cm²	5,6 Pa/cm²	

CONTROL DE SUSTANCIAS NOCIVAS

ENSAYO	NORMAS	REQUISITO	ZONA	RESULTADOS
Formaldehído	UNE-EN 14184-1	< 75 mg/Kg	SANDWICH	< 16 ppm
Ftalatos	ISO-14389	DEHP+BBP+DBP+DIBP < 1000 ppm DIHP+DMEP+DIPP+DHP < 1000 ppm DNIP+DIDP+DNOP < 1000 ppm	SANDWICH	< 300 ppm
Residuos de disolventes	Extracción con metanol Análisis cromatográficos GC-MS	NMP < 3000 mg/Kg DMAc < 3000 mg/Kg DMF < 3000 mg/Kg Benceno < 5 mg/Kg	SANDWICH	NMP < 50 mg/Kg DMAc < 50 mg/Kg DMF < 50 mg/Kg Benceno < 5 mg/Kg
Metales totales	UNE-EN 16711-1	Cd < 100 ppm Pb < 500 ppm	SANDWICH	Cd < 25 ppm Pb < 25 ppm
Compuestos orgánicos de estaño	Extracción con disolución tampón / reducción Análisis cromatográficos LC-MS/MS	TBT < 1000 ppm TPT < 1000 ppm DBT < 1000 ppm DOT < 1000 ppm	SANDWICH	< 100 ppm
Tensioactivos, residuos humectantes (APEO)⁽⁹⁾ NP,NP (EO) Total	Extracción con metanol Análisis cromatográficos LC-MS/MS	Suma < 100 ppm	SANDWICH	< 50 ppm

¿Cómo COLOCARSE la mascarilla?

NOTA: PONER LA MASCARILLA SOBRE PIEL DESNUDA (piel afeitada y sin presencia de pelo en la cara).

1. Lavarse las manos con agua y jabón o aplicar solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
2. Identificar la parte superior de la mascarilla.
3. Colocar la mascarilla en la cara.
4. Sostener la mascarilla desde el exterior y ajustar la parte elástica detrás de las orejas.
5. Ajustar la mascarilla hasta la barbilla.
6. Comprobar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.
7. Una vez ajustada, NO tocar la mascarilla con las manos. De lo contrario, lavarse las manos con agua y jabón o aplicar solución hidroalcohólica.



¿Cómo QUITARSE la mascarilla?

1. Quitarse los guantes de protección (en caso de llevarlos).
2. Lavarse las manos con agua y jabón o aplicar una solución hidroalcohólica.
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla.
4. Colocar la mascarilla que se va a desechar en un recipiente específico (contenedor con tapa y control manual o para restos biológicos).
5. Lavarse las manos con agua y jabón o aplicar solución hidroalcohólica.

¿Cómo LAVAR y SECAR la mascarilla?

1. Para el lavado de la mascarilla, se recomienda realizar un ciclo completo de lavado con el detergente habitual, a una temperatura máxima de 60°C.
2. Evite el contacto entre una mascarilla sucia a lavar y la ropa limpia. La persona a cargo del lavado debe protegerse frente a la mascarilla sucia.
3. No se deben utilizar productos que dañen los materiales y que disminuyan su capacidad protectora.
4. Se recomienda secar la mascarilla dentro de las 2h siguientes de su lavado.
5. No se debe secar o higienizar con un horno microondas.
6. Durante el secado y el almacenamiento, se deben evitar los ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar.
7. Después de cada lavado inspeccione, con las medidas de protección oportunas, que la mascarilla no se ha dañado. De lo contrario, deséchela.

ATENCIÓN:

- _ Durante una posición de espera, **no se debe colocar en la frente o debajo de la barbilla.**
- _ **En el caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituir por otra.**
 - _ **La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar correctamente sobre la cara.**

MEDIDAS

