

FICHA TÉCNICA



Producto: GUANTES DE NITRILLO MEDICO
SIN POLVO

Clasificación: EPI Cat. III & MMD Clase I

Talla: S/M/L/XL

Referencia: GN001ITC

Descripción General:

El guante de Nitrilo proporciona una excelente resistencia a químicos, y es una alternativa ideal en caso de alergia al guante de látex. Son bastante sensibles y por ello también son muy utilizados en el ámbito sanitario. Además, se caracteriza por su alta resistencia a la perforación. El producto es no estéril.

Características Generales

Normativa	EN455-1/2/3, EN374-5 VIRUS, EN374-1, En 374-2
Color	Azul
Material	Nitrilo
Esterilizado	No
Cantidad por Pack	100 unidades
Cantidad de Packs por Caja	10 Packs

Instrucciones de Uso



1 Verifique los guantes: compruebe que son de su talla, que están en perfectas condiciones y que son el tipo indicado para el trabajo que debe realizar.



2 Lávese y séquese las manos antes de ponerse los guantes. Si aún están húmedas, no se los ponga.



3 Evite el contacto con productos químicos lo máximo posible y asegúrese de que no entran líquidos en el interior.



4 No exceda del tiempo de permeación indicado para el producto químico con el que está trabajando.



5 No use ni reutilice guantes que estén desgastados o deteriorados.



6 Antes de quitarse los guantes, evite cualquier contacto directo con la piel. Quitese los guantes sin tocar la parte exterior. Para los guantes holgados y reutilizables, retire los guantes tirando primero de los dedos, asegurándose de no tocar la zona exterior del guante, posiblemente contaminada, con la piel desprotegida. Para los guantes ajustados y desechables se debe tomar el guante por el extremo de la parte interior del puño al retirar el guante.



7 Deposite los guantes en el contenedor adecuado.



8 Lávese y séquese las manos cuando se haya quitado los guantes.



9 Es recomendable aplicar crema de manos antes o después de ponerse los guantes.



10 Consulte con su médico inmediatamente si nota alguna irritación o reacción alérgica.